

ガンマー10 アルファ機器の「安全上の注意事項」について

安全に使用するための「**取扱い説明書**」

ガンマー10 アルファ機器を安全に使用するために、以下の注意事項を守り下さい。

安全上のご注意

■ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

※ご使用の前に、「**ガンマー10-αご使用マニュアル**」を必ずよくお読みの上、正しくお使い下さい。

お客様によってはご使用できない方もいますので、必ず、上記マニュアルをお読みください。

※「ガンマー10-αご使用マニュアル」は、製品を安全に正しくお使いいただきお客様への危険を未然に防止するためのものです。会員のお客様はホームページ内にある本マニュアルをご一読ください。

※以下の注意事項は、誤った使用をした場合に想定される内容を「**危険**」の区分にしています。**危険**:誤った使用をすると、人が死亡又は重傷を負う危険が生じる、切迫の可能性が想定される内容を示しています。



安全に正しくお使いいただくために

■ご使用にあたり下記に該当または疑いのある方は、ご使用できません。医師にご相談下さい。

- * 顔面神経痛(顔面けいれん)
- * 統合失調症、てんかん
- * 悪性腫瘍、脳・心臓疾患、動脈硬化症
- * 生理中、妊娠中、発熱中、皮膚知覚障害、皮膚疾患
- * アルコール依存症、飲酒後の使用
- * けいれん閾値(いきち)を低下させる薬剤服用中
- * 脳の術後完治していない
- * 脳深部刺激療法(DBS)・頭蓋磁気刺激療法(TMS)等の脳波電極装着中
- * ペースメーカー、人工内耳、投薬ポンプ、頭蓋内動脈クリップ等の使用
- * 医師に低周波治療などの使用を止められている
- * その他、慢性疾患や治療中の脳疾患がある、または病気をお持ちの方

■ご使用前に必ず下記の注意事項をご確認下さい。

- ・本機器は健康機器であり、病気予防を目的としたものです。治療を目的とした使用はできません。
- ・臨床神経生理学学会による脳刺激法に関する委員会において、「経頭蓋直流刺激の安全性について」の報告に基づき、本機器は脳への刺激は3mA 以内で連続 30 分より短い刺激に設定されています。
- ・連続使用は **30 分未満**とし、**再使用は 1 時間以上**の間を開けてからご使用ください。(出典:https://www.jstage.jst.go.jp/article/sobim/39/2/39_87/_pdf 「4. 安全性」ご参照)
- ※本機器のオート(自動)31 分設定の場合は各機能終了後、一旦、OFF の状態がありますので、連続使用 30 分には当たりませんので問題はありません。安心してご使用いただけます。